


clarity


WakeAssure

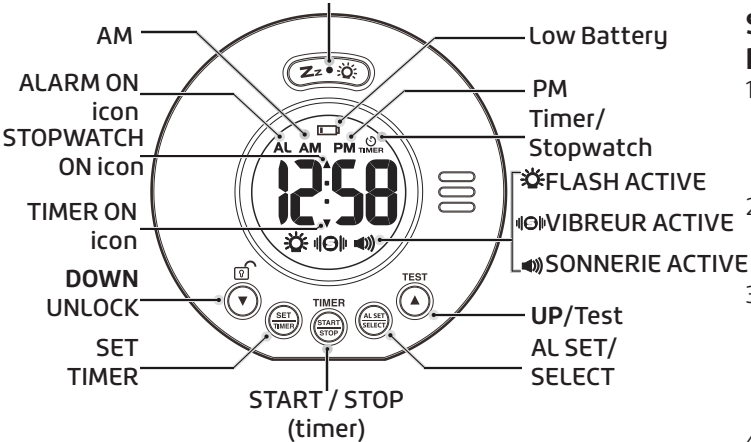

Snooze / Flashlight



Batterie "AAA"

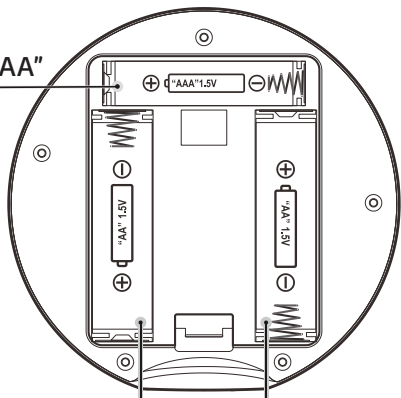

2 x Batteries "AA"

BATTERY INSTALLATION

- Votre Jolt nécessite 1 x pile alcaline AAA et 2 x piles alcalines AA.
1. À l'arrière de votre unité, appuyez sur le loquet et enlevez le couvercle de pile.
 2. Installez les piles tel qu'illustré, en vous assurant que la polarité correspond au diagramme ci-dessus.
 3. Fermez le couvercle de pile ; veillez à ce que le loquet s'enclenche.

IMPORTANT!

La fonction **Verrouillage automatique** s'active si l'on appuie sur aucun bouton pendant plus d'1 minute. Cela permet d'éviter que l'on appuie sur les boutons par erreur lors de déplacements ou pendant le sommeil.

POUR DÉVERROUILLER L'HORLOGE :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **DOWN/UNLOCK** jusqu'à entendre les tonalités de déverrouillage.

SET TIME/SET SNOOZE DURATION (Régler l'heure/ Régler la durée d'arrêt momentané)

1. Appuyez et maintenez enfoncé **SET/TIMER** (Régler/Minuterie) jusqu'à ce que les chiffres des heures se mettent à clignoter ; relâchez le bouton **SET/TIMER**. Appuyez sur **UP/DOWN** (Haut/Bas) pour régler l'heure en heures.
2. Appuyez sur **SET/TIMER** de nouveau ; vous verrez clignoter les chiffres des minutes. Appuyez sur **UP/DOWN** pour régler l'heure en heures.
3. Appuyez sur **SET/TIMER** de nouveau ; appuyez sur **UP/DOWN** pour choisir entre l'affichage 12 heures ou 24 heures pour votre Jolt (le réglage par défaut est l'affichage 24 heures). Si l'affichage 12 heures est sélectionné, appuyez sur **UP/DOWN** pour choisir entre AM et PM.
4. Appuyez sur **SET/TIMER** de nouveau ; vous pourrez maintenant sélectionner la durée de SNOOZE (Arrêt momentané, 5 minutes par défaut). Vous pouvez choisir une durée comprise entre 5 minutes et 60 minutes.
5. Appuyez sur **SET/TIMER** de nouveau pour quitter le mode de configuration de l'heure/arrêt momentané.

SET ALARM (Programmer l'alarme, 6:00 AM/6 h par défaut)

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **AL/SET** (Alarme/Régler) jusqu'à ce que **AL** (Alarme) s'affiche et que les chiffres des heures commencent à clignoter ; relâchez le bouton **AL/SET**. Appuyez sur **UP/DOWN** pour régler l'heure de votre alarme programmée.
2. Appuyez sur **AL/SELECT** de nouveau ; vous verrez clignoter les chiffres des minutes. Appuyez sur **UP/DOWN** pour régler les minutes de votre alarme programmée.
3. Appuyez sur **AL/SELECT** de nouveau ; appuyez sur **UP/**

DOWN pour choisir le niveau de vibration (HI/LO, ou Fort/Faible). Les icônes correspondantes sont affichées à l'écran.

4. Appuyez sur **AL/SELECT** de nouveau ; appuyez sur **UP/DOWN** pour choisir le niveau sonore (HI/LO, ou Fort/Faible). Les icônes correspondantes sont affichées à l'écran.
5. Appuyez sur **AL/SELECT** de nouveau pour quitter le mode de configuration d'alarme.

SÉLECTIONNER LE MODE D'ALARME

n mode veille, appuyez sur **AL/SELECT** pour basculer entre les modes d'alarme disponibles ; voir ci-dessous.

RAPPEL - POUR DÉVERROUILLER L'HORLOGE :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **DOWN/UNLOCK** (Bas/Déverrouiller) jusqu'à ce qu'une tonalité retentisse.

	Mode alarme audible
	Mode alarme vibreur de lit
	Mode alarme lumineuse
	Mode audible + bed shaker (vibreur de lit)
	Mode audible + alarme lumineuse

ARRÊT MOMENTANÉ/ÉTEINDRE L'ALARME

6. Pour activer la fonction d'arrêt momentané : lorsque l'alarme est activée, appuyez sur le bouton **SNOOZE** pour activer la fonction d'arrêt momentané ; l'alarme s'arrêtera et s'allumera de nouveau une fois la durée d'arrêt momentané expirée.
7. Pour éteindre : lorsque l'alarme est activée, appuyez une fois sur **AL SEL/SELECT** ; l'alarme s'arrêtera et s'activera le jour suivant à la même heure.

LAMPE DE POCHE

Appuyez et maintenez enfoncé **SNOOZE/FLASHLIGHT** (Arrêt momentané/Lampe de poche) pour activer la fonction de lampe de poche. Appuyez et maintenez enfoncé **SNOOZE/FLASHLIGHT** de nouveau pour l'éteindre.

FONCTION DE MINUTERIE

1. En mode veille, appuyez une fois sur **SET/TIMER** pour activer la fonction de minuterie/chronomètre. L'icône de minuterie s'affiche à l'écran, et les chiffres se mettent à clignoter.
2. Appuyez sur **DOWN** (Bas) pour régler l'heure en heures, appuyez sur **UP** (Haut) pour régler la minuterie en minutes.
3. Appuyez sur **START/STOP** (MARCHE/ARRÊT) pour démarrer la minuterie ; vous verrez clignoter l'icône **DOWN** et « : ».
4. Lors du compte à rebours de la minuterie, appuyez sur **START/STOP** pour mettre la minuterie en pause; ensuite, appuyez sur **START/STOP** pour reprendre, OU appuyez et maintenez enfoncé **START/STOP** de nouveau pour arrêter ou réinitialiser la minuterie.
5. Lorsque la minuterie atteint 0:00, l'alarme s'éteint. La minuterie se met alors à compter le temps afin d'affichee le temps écoulé depuis l'expiration de la minuterie. Appuyez sur **START/STOP** pour arrêter l'alarme.
6. **REMARQUE** : lors du compte à rebours de la minuterie, appuyez sur **SET/TIMER** pour revenir à l'affichage d'horloge. L'icône de minuterie clignote pour indiquer que la minuterie/le chronomètre est actif(ve). Pour arrêter la minuterie dans ce mode, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **DOWN/UNLOCK**.

FONCTION DE CHRONOMÈTRE

1. En mode veille, appuyez une fois sur **SET/TIMER** pour activer la fonction de minuterie/chronomètre. L'icône de minuterie s'affiche à l'écran, et les chiffres se mettent à clignoter. Appuyez et maintenez enfoncé **START/STOP** pour remettre l'affichage à « 0:00 ».
2. Appuyez sur **START/STOP** (MARCHE/ARRÊT) pour démarrer le chronomètre; vous verrez clignoter l'icône **UP** et « : ».
3. En mode chronométrage, appuyez sur **START/STOP** pour mettre le chronomètre en pause ; ensuite, appuyez sur **START/STOP** pour reprendre, OU appuyez et maintenez enfoncé **START/STOP** de nouveau pour arrêter ou réinitialiser le chronomètre.
4. **REMARQUE** : en mode chronométrage, appuyez sur **SET/TIMER** pour revenir à l'affichage d'horloge. L'icône de minuterie clignote pour indiquer que la minuterie/ le chronomètre est actif(ve).

PILE FAIBLE

Lorsque l'icône LOW BATTERY (Pile faible) s'affiche, remplacez les piles avec des piles équivalentes/alcalines uniquement. **REMARQUE** : l'utilisation fréquente de la fonction vibreur de lit avec votre alarme réduira la durée de vie des piles.

DÉPANNAGE

Si votre Jolt ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité en enlevant/réinstallant les piles. Vous devrez régler l'heure de nouveau.

MODE DE TEST

Afin de vérifier rapidement les fonctions de l'unité, déverrouillez d'abord le Jolt (appuyez et maintenez enfoncé le bouton **DOWN/UNLOCK** pour déverrouiller), puis appuyez et maintenez sur le bouton **TEST**. Les fonctions suivantes s'activent pendant 5 secondes : vibreur de lit, lumière clignotant, alarme audible.

CARACTÉRISTIQUES

Durée d'alarme	1 minute	
Durée d'arrêt momentané	5 to 60 minutes	
Réglages par défaut :	Format horaire	24 hour
	Heure	0:00
	Alarme	6:00 (6:00 AM)
	Niveau de vibration/alarme	Hi
	Durée d'arrêt momentané	5 minutes
	Minuterie/chronomètre	23 hrs 59 mins
Alarme audible	80dB SPL at 1m	

GARANTIE

Les informations de garantie et de réparation suivantes s'appliquent uniquement aux produits achetés et utilisés aux États-Unis et au Canada. Pour de plus amples informations sur la garantie dans d'autres pays, veuillez contacter votre revendeur ou distributeur local. Garantie limitée : Clarity Products LLC (« Clarity ») garantit à l'acheteur original que, sous réserve des limitations et exclusions énoncées ci-dessous, ce produit sera exempt de tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale (« Période de garantie »). L'obligation de Clarity en vertu de la présente garantie s'appliquera, à la discrétion de Clarity, sans frais, à une pièce ou à l'unité qui se révèle défectueuse en termes de matériau ou de fabrication pendant la période de garantie. Veuillez utiliser l'emballage d'origine, ou emballer l'unité dans un carton solide avec suffisamment de matériaux d'emballage pour éviter tout dommage. Inclure les informations suivantes :

- Une preuve d'achat indiquant :
 - Numéro de modèle et date d'achat ;
 - Adresse de facturation ;
 - Adresse de livraison ;
 - Nombre et description des unités expédiées ;
 - Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter, si cela s'avère nécessaire ;
 - Le motif du renvoi et la description du problème.

Tout dommage survenu pendant le transport est considéré comme étant la responsabilité du transporteur, et les réclamations doivent être faites directement auprès de ce dernier.

Pour des informations détaillées et complètes relatives à la garantie et la façon de retourner votre produit, veuillez visiter www.clarityproducts.com/returns.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

INFORMATIONS RELATIVES À LA PARTIE 15 DU RÈGLEMENT DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et respecte les limites applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement engendre, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Toutefois, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie ; si cet équipement provoque des interférences à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à essayer de corriger l'interférence par l'une des mesures suivantes :1. Lorsque cela peut se faire sans danger, réorientez l'antenne réceptrice de la télévision ou la radio.

2. Dans la mesure du possible, changez de place la télévision, la radio, ou autre récepteur par rapport à l'appareil.

AVERTISSEMENT : Dans un souci de conformité avec la directive de la FCC relative aux limites d'exposition aux RF, posez l'unité de base à au moins 20 cm des personnes à proximité.

Pour le port sur une partie du corps, cet appareil a été testé et répond aux directives de la FCC relatives aux limites d'exposition aux RF lors d'une utilisation avec les accessoires fournis par Clarity ou désignés pour ce produit. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité avec les directives FCC en matière d'exposition.

AVERTISSEMENT : Toute modification de l'équipement non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation octroyée à l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) (CANADA)

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

[Le terme « IC : » devant le numéro de certification/d'enregistrement signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées].

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B en matière d'émissions de bruit radioélectrique des appareils numériques définies dans la norme ICES-003 sur le matériel brouilleur intitulée « Appareils numériques », du ministère des Communications du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes RSS sans licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.